



# Liko Tryghedsvest, mod. 93, 94

## Brugsanvisning

7DK160146-01

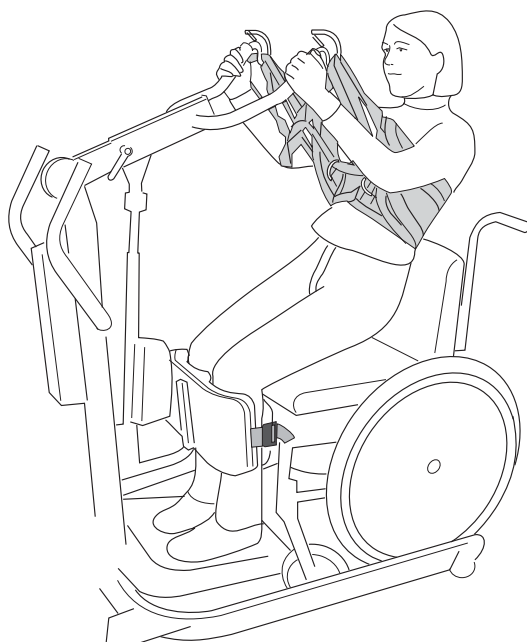

mod. 93

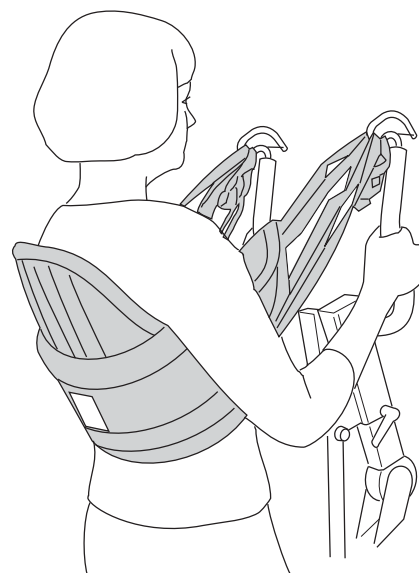

mod. 94

## Liko Tryghedsvest

Liko Tryghedsvest er en oprejsningsvest, som er unik i sikkerhed, form og funktion. Tryghedsvesten løfter bagom ryggen og under armene, indersiden er beklædt med et materiale som modvirker glidning på kroppen.

Det fast syede taljebælte bidrager til sikkerheden ved at forhindre risikoen for at brugeren kan glide ud af oprejsningsvesten.

Princippet indebærer at vi kombinerer to samarbejdende båndøjer på hver ophængningskrog.

Liko Tryghedsvest findes i forskellige størrelser og udførelser. Model 94 er udstyret med en høj rygstøtte for at give ryggen ekstra støtte.

Liko Tryghedsvest er først og fremmest beregnet til brug i kombination med Sabina oprejsningslift med smal løfteåg (350-åg).

Liko Tryghedsvest og Sabina oprejsningslift danner tilsammen en funktionel enhed. Læs brugsanvisningerne for begge produkter for at få fuldstændig information og opnå det bedste løfteresultat.

Det er vigtigt helt at forstå indholdet i brugsanvisningerne, og kun personale som er informeret bør anvende udstyret.

**△ er en advarselstrekant for momenter hvor særlig forsigtighed bør iagttages.**


*I brugsanvisningen kaldes den, der løftes, for brugeren, og den, der hjælper, for medhjælperen.*

**△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades gratis på [www.liko.com](http://www.liko.com).**

 **Liko**

# Beskrivelse af Liko Tryghedsvest

1. Ydervest
2. Mærkat
3. Størrelsemarkering (farve)
4. Fabrikationsnummer
5. Ydre båndøje
6. Indre båndøje
7. Øjebånd
8. Underkant
9. Taljebælte
10. Indre båndstrop
11. Ydre båndstrop
12. Ekstra rygstøtte

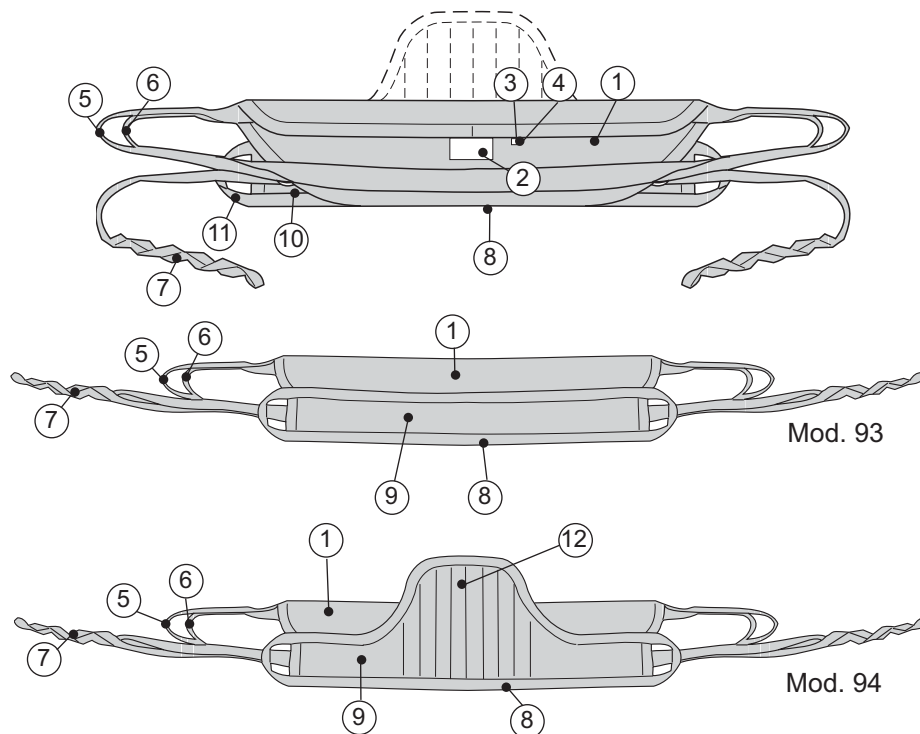


## △ Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere hjælpere, bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- På trods af at Likos løfteåg er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt ordentligt, at kontrollere at stopperne er korrekt hængt på løfteåget.
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt for løftets gennemførelse.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Check at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste under arbejdsmomentet.

# Beskrivelse af båndøjernes funktion

## Ydervestens båndøjer

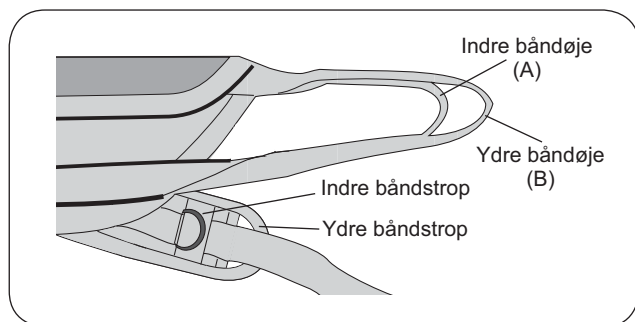

Ydervesten er forsynet med 2 båndøjer: ydre og indre båndøje, for øget flexibilitet i anvendelsen. Generelt anbefales påhægtning i det indre båndøje (A) for at opnå maximal opretstående stilling. Det ydre båndøje (B) anvendes når brugerens omfang kræver mere plads eller hvis brugeren er for kort i forhold til højden på Sabinas ophængningskroge. Vi anbefaler i de tilfælde man vælger det indre båndøje – at også det ydre båndøje hægtes på kroge, man har da bedre visuel kontrol af båndøjerne.


## Øjebånd



Et indre øje giver større tiltrækning.

Et ydre øje mindsker tiltrækningen.


# Oprejsning ved aktivt løft i Sabina med Liko Tryghedsvest

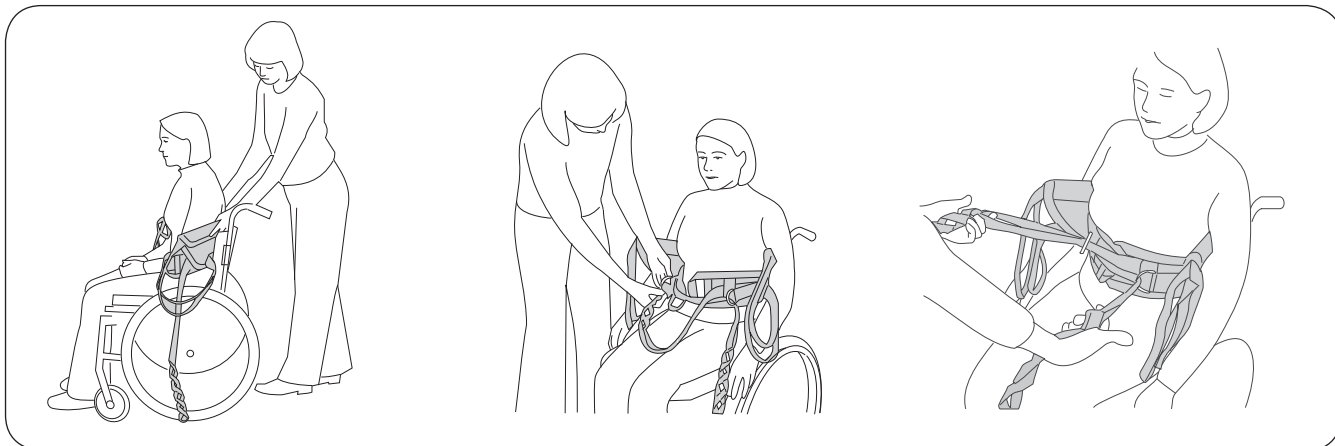

Før Tryghedsvesten ned bag brugeren. Taljebæltets underkant skal være ned mod taljen og placeres nærmest mod kroppen. Armene skal være uden på vestdelen og taljebæltet.

Kryds øjebåndene og stik dem gennem modstående sides metaløjer. Se beskrivelse på side 4, for forskellige alternativer.

Træk øjebåndene frem og kontroller tiltrækningseffekten. Hvis taljebæltet ikke trækkes tilstrækkeligt til – justeres øjebåndets "trådning".

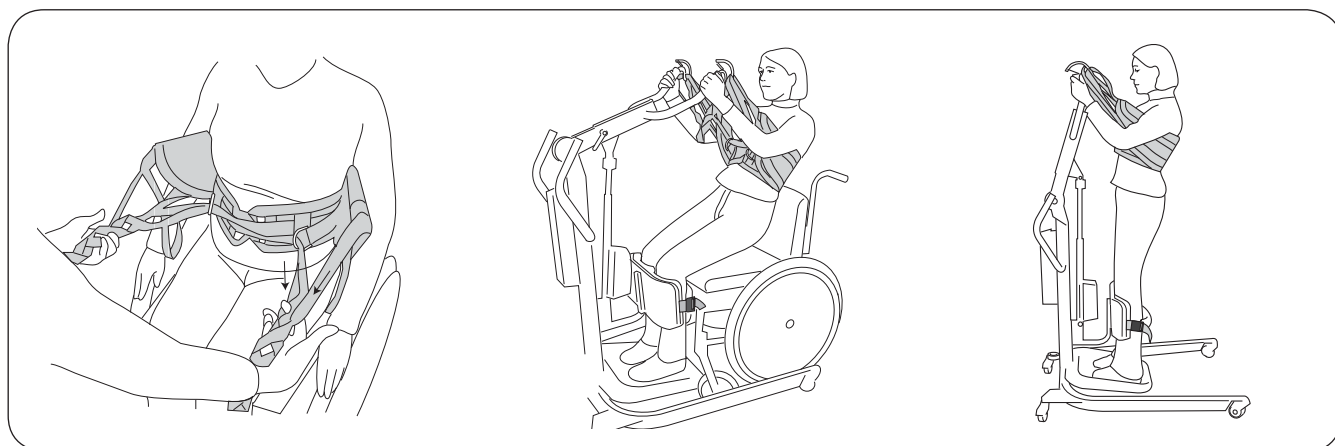

Vurdér om båndøjerne er passende før de sættes på krogene, ved at trække (lige fremad) i ydervestens båndøjer samtidig med øjebåndene.

Se beskrivelsen af båndøjerne, side 2; Øjebånd.

Prøv at finde en passende tilstramning rundt om taljen ved at vælge en kombination, hvor båndøjer og øjebånd har samme spænding ved tilstramning/løft.

Kør Sabina ståliften frem, tilpas bredden på underdelen så fødderne kan anbringes midt på fodpladen.

Brugerens underben skal være parallelle med underbensstøtten.

Justér støttens højde og dybde i forhold til underbenene, så den sidder lige under knæene.

Sæt stroppen i og spænd lægbåndet.

Nu er de allerede afprøvede placeringer af øjebåndene og båndøjerne klar til at blive hægtet på løftebjælkerne.

**Løftning:** Kontrollér løftebevægelsen ved hjælp af kontrolknapperne op og ned – der er to hastigheder.

Hvis det er muligt, skal brugeren selv hjælpe aktivt til ved at gribe fat i håndtagene på løfteåget og trække sig op.

**Tips!** Vi anbefaler, at brugeren læner overkroppen tilbage, når han/hun løftes for at kompensere for svag strækmuskulatur i underkroppen. Dette letter løftningen, øger komforten og modvirker, at vesten glider (op).

**Tips!** Husk, at det er nemmere at løfte, hvis brugeren sidder relativt højt, dvs. at hofte er i samme niveau eller helst højere end knæene.

## Hvor højt skal der løftes?


Hvor højt personen skal løftes afgøres i hver enkelt tilfælde.

Det højest mulige løft reguleres ved hjælp af:

**A** Højdeindstillingen af masten i underdelen. Se brugsanvisningen til din Sabina ståliften.

**B** Valget mellem det indvendige og det udvendige båndøje på ydervesten. Se side 2: Ydervestens båndøjer.


## Forskellige måder at "tråde" øjebåndene.

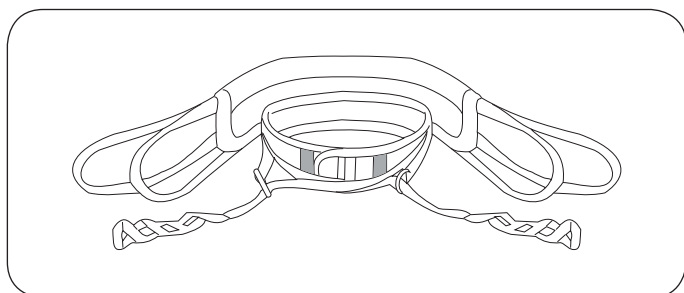

### Alt A: For meget små brugere


Træk øjebåndene gennem de indvendige båndstropperne, inden de trækkes gennem metaløjjerne.

Dette giver maksimal sammentrækning.

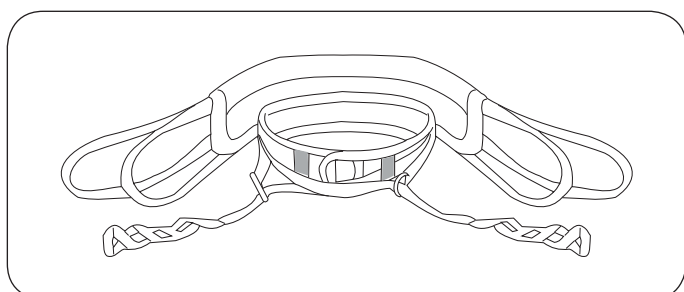

### Alt B: Mellestilling

Træk kun det ene øjebåndet gennem den indvendige båndstrop. Kryds derefter øjebåndene og træk dem gennem metaløjjerne.

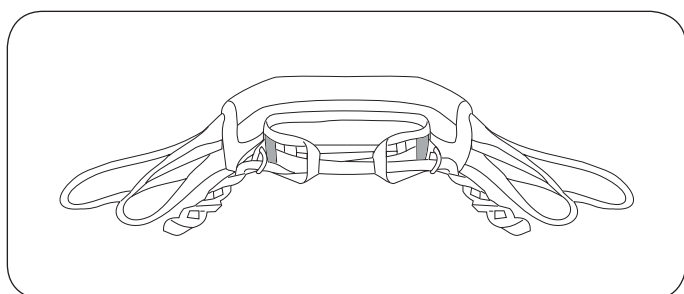

### Alt C: Til større vidde


Lad øjebåndene gå gennem både de indvendige og begge udvendige båndstropperne, før de trækkes gennem metaløjjerne.

### Tips!

Hvis vidden skal øges endnu mere, kan øjebåndene forlænges med Liko forlængerstropper.


# Tilbehør til Liko Tryghedsvest

## Polstring (til mod. 93)

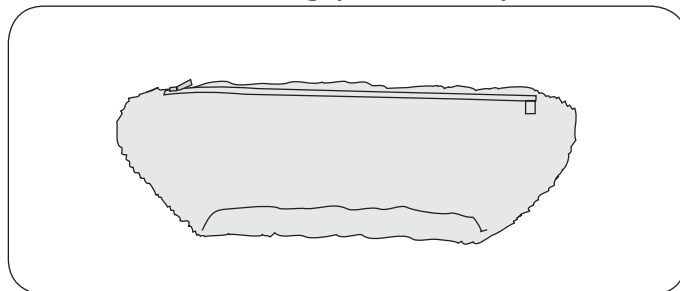


Tryghedsvest model 93 er forsynet med lynlås, hvis man ønsker at supplere med en polstring i syntetisk fåreskind for at få en blødere og mere trykudjævnnende overflade.

## Øjeclips

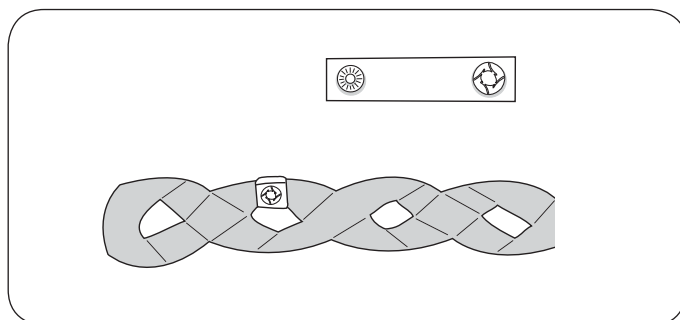

Praktisk tilbehør til mærkning af de øjer, som er afprøvet til en bestemt person. Det gør det nemmere for medhjælperne at vælge det rigtige øje at hægte på løfteåget.

## Halebånd

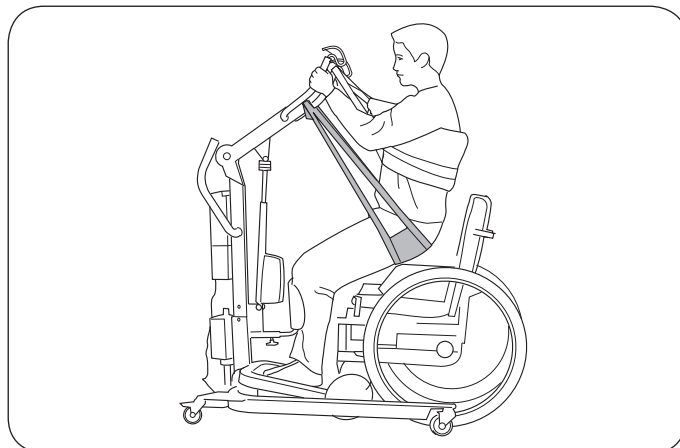


I nogle tilfælde kan et halebånd (tilbehør: 3591115) hjælpe med til at løfte. Halebåndet trykkes så langt som muligt ned mod halebenet og hjælper derved til med at løfte under bagdelen. Når brugeren står oprejst, mister halebåndet sin belastning og kan nemt føres ud til siden ved f.eks. toiletbesøg.

Ved sænkning til siddende stilling kan det være en fordel at fjerne halebåndet, så brugeren kan komme tilstrækkeligt langt tilbage i stolen. Når halebåndet anvendes, kræves særligt tilbehør monteret på liften (halebåndsåg).

Læs brugsanvisningen til halebåndsåget inden den anvendes.

# Oversigt over Liko Tryghedsvest

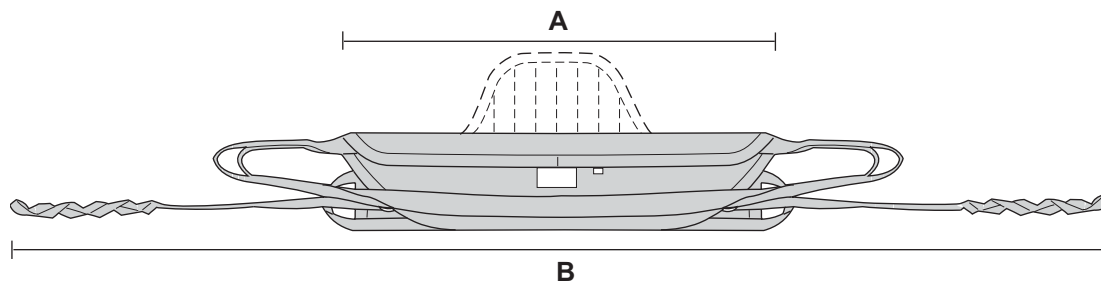

Produkt	Prod. nr.	Størrelse	Personvægt*	Vestbredde (cm)
Liko Tryghedsvest	3593115	Medium	< 80 kg	A: 90 B: 210
Liko Tryghedsvest	3593116	Large	> 70 kg	A: 105 B: 235
Liko Tryghedsvest med ekstra rygstøtte	3594415	Medium	< 80 kg	A: 90 B: 210
Liko Tryghedsvest med ekstra rygstøtte	3594416	Large	> 70 kg	A: 105 B: 235

\*OBS! Den angivne personvægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

Liko's løfteseler er godkendt til en vægt på max. 200 kg eller mere – se produktmærkningen.

Tilbehør	Prod. nr.	
Polstring, Medium (passer til 3593115)	3691035	
Polstring, Large (passer til 3593116)	3691036	
Halebånd	3691115	
Markerbånd, gule	3666035	Markerbånd fås i flere farver.
Markerbånd, blå	3666036	

## Vejledning til valg af størrelse

Den netbeklædte del af vesten bør nå ordentligt rundt om ryggen og under armene.  
En for stor vest kan medføre, at brugeren ikke kan nå at gribe fat i løftebøjlerne.

**Vaskevejledning:**   Tørretumbler frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkeseddel inden vask!

Liko Tryghedsvesten er udelukkende beregnet til anvendelse sammen med Liko Sabina stålifte.  
Vi anbefaler Sabina med 350-åg.

**CE** Medicinteknisk klasse I produkt

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

## ⚠️ Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko.  
Læs derfor brugsanvisningen til både lift og liftilbehør grundigt.  
Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt.  
Kun velinformerede personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes.  
Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget liftilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

 **Liko**

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Fabrikant:  
**Liko AB**  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

Forhandler i Danmark:  
**Botved Plejestyret A/S**  
Nørrelundvej 5  
2730 Herlev  
Tlf.: 80 373737  
Fax: 20 703737  
[info@botved.dk](mailto:info@botved.dk)  
[www.botved.dk](http://www.botved.dk)

