


Golvo 8000 / 8008

Brugsvejledning

Dansk

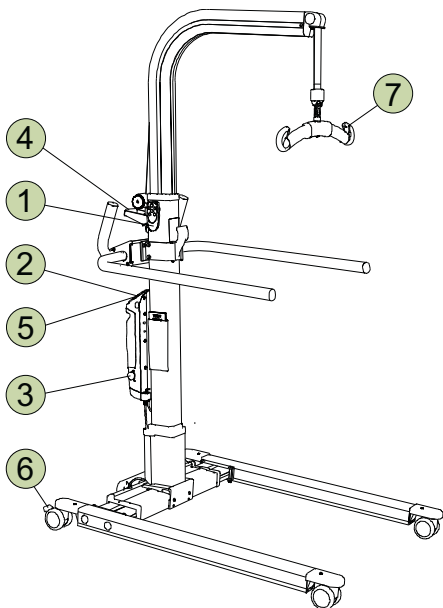


Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løfte-tilbehør inden anvendelse.
 - Planlæg løftet nøje.
 - Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt påhængt løftebøjlen.
 - **Maks. belastning: 200 kg**
- For at bibeholde maks. belastning kræves tilbehør der overholder samme belastning eller mere.

VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra www.liko.com.

1 Håndbetjening IR

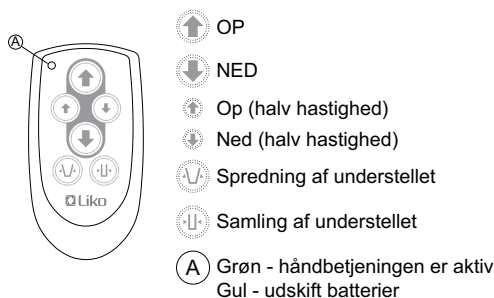

OBS! Såfremt liften har stået uanvendt i mere end 24 timer, skal systemet aktiveres ved at trykke på en tilfældig knap på kontrolboksens betjeningspanel, inden håndbetjening IR kan anvendes.

📖 Læs brugsanvisningen for mere information.


2 Betjeningspanel




📖 Læs brugsanvisningen for mere information.

3 Nødstop

Aktivering:

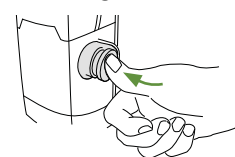


Tillbagestilling:

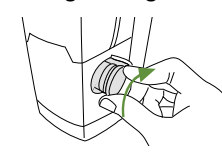

4 Mekanisk nødsænkning

Aktivering:

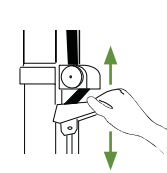


Genindstilling af løfteområde:




📖 Læs brugsanvisningen for mere information.


5 Elektrisk nødsænkning / nødhævning

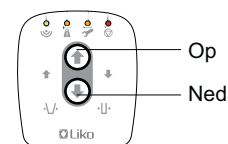


6 Låsning af hjulene

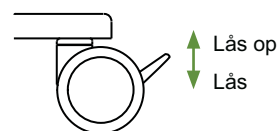

7 Afkrogningsbeskyttelse

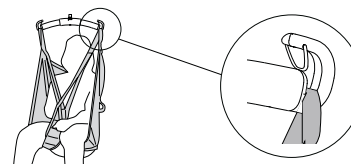


Undgå skæve løft!

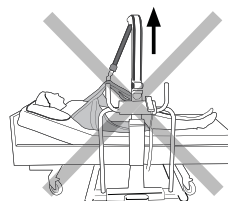

⚠ Skæve lift kan medføre tipperisiko!

Opladning af batterier

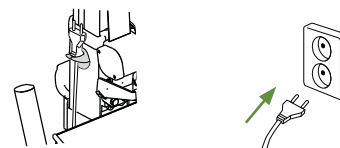

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- **Liften kan ikke oplades, når nødstopet er aktiveret.**

Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

Rengøring

Rengør liften efter behov, ved af tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand eller sprit.

Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstopet ikke er trykket ind, se ③
- liftens batteri er opladet
- liften skal aktiveres når den har stået ubrugt i mere end 24 timer ①
- håndbetjeningens batteri fungerer, se ① A.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades fra www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Liko

A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se