


Sabina 200

Brugsvejledning

Dansk

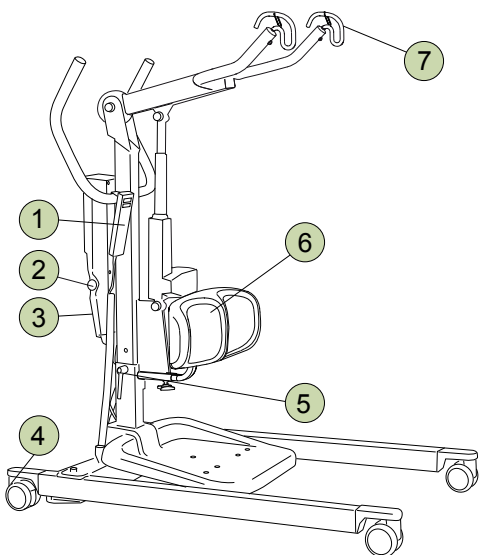

1 Håndbetjening




- ↑ Op
- ↓ Ned
- ⊖ Til benspredning
- ⊕ Til bensamling
- A Indikerer lav batterikapacitet


2 Nødstop

Aktivering:


Tilbagestilling:

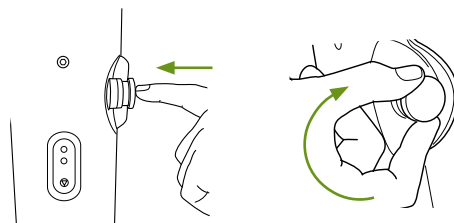

3 Elektrisk nødsænkning

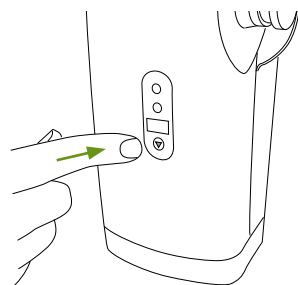


4 Låsning af hjulene

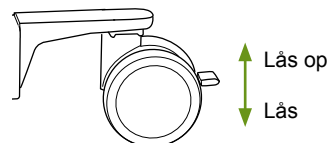


Indstillinger


5 Brugers højde

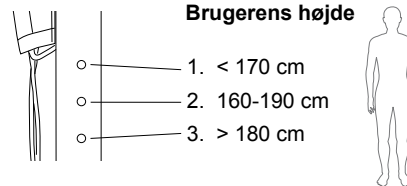


6 Underbensstøtte

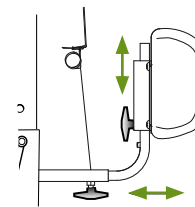

7 Afkrogningsbeskyttelse

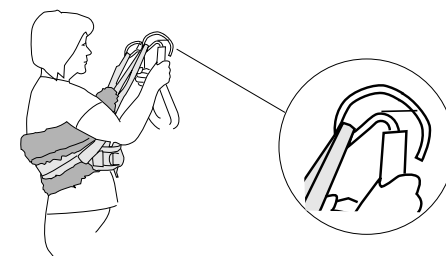

Opladning af batterier

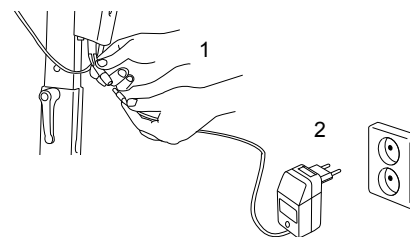

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- **Nødstopet skal ikke være trykket ind under opladning.**

Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

Rengøring

Rengør liften efter behov, ved at tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand eller sprit.

Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstopet ikke er trykket ind, se ②
- batteriet er opladt
- håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades fra www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løfte-tilbehør inden anvendelse.
- Planlæg løftet nøje.
- Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt påhængt løftebøjlen.
- **Maxlast: 160 kg**

For at bibeholde maks. last kræves tilbehør der overholder samme maks. last eller mere.

VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra www.liko.com.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se