


# Uno 100/102

## Brugsvejledning

Dansk

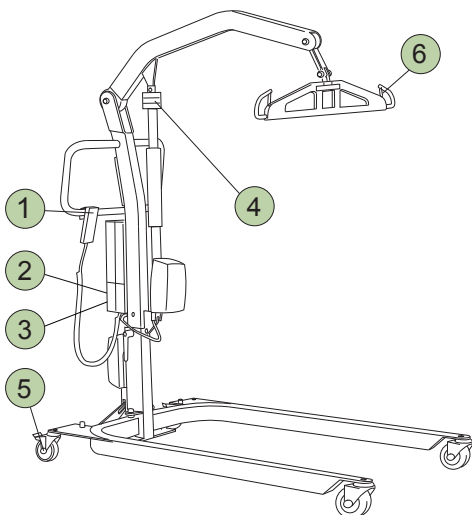

### Sikkerhedsforskrifter


- Læs brugsanvisningen for både lift og løftetilbehør inden anvendelse.
- Planlæg løftet nøje.
- Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt påhængt løftebøjlen.
- **Maks. last Uno 100: 205 kg**  
**Maks. last Uno 102: 175 kg**

For at bibeholde maks. last kræves tilbehør der overholder samme belastning eller mere.

### VIGTIGT!


Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra [www.botved.dk](http://www.botved.dk).

### 1 Håndbetjening

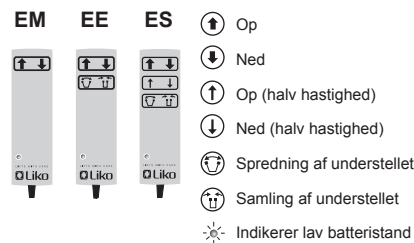


### 2 Nødstop


#### Aktivering:

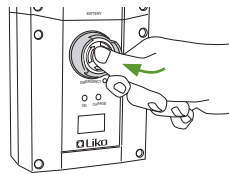

#### Deaktivering:

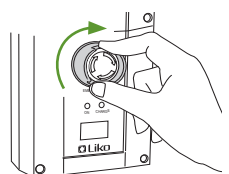


### 3 Elektrisk nødsænkning

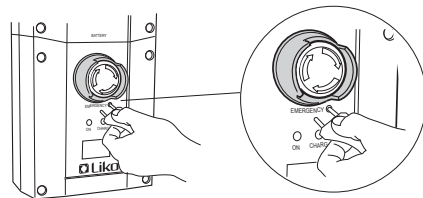


**⚠ Genstanden, som anvendes til at trykke ind med, må ikke være for skarp, da dette kan medføre beskadigelse af kontrolboksen!**


### 4 Mekanisk nødsænkning

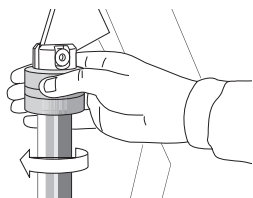


### 5 Låsning af hjulene

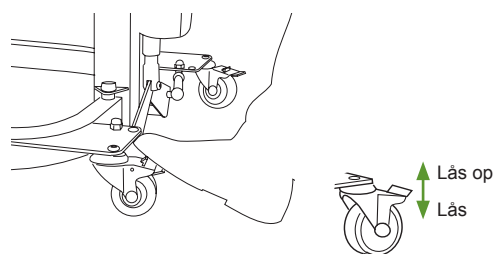

### 6 Afkrogningsbeskyttelse

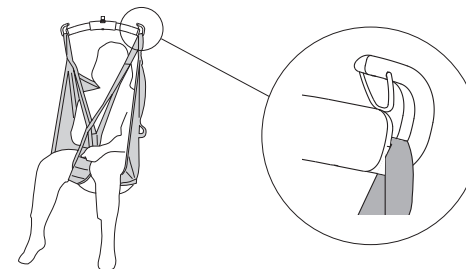

### Indstillinger

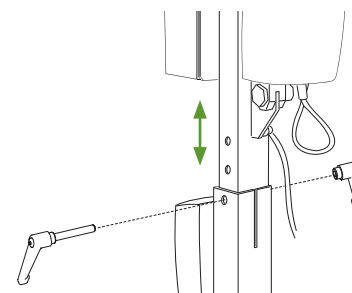

Læs brugsanvisningen for mere information.

### Opladning af batterier

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- **Nødstopet skal ikke være trykket ind under opladning.**

### Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

### Rengøring

Rengør liften efter behov, ved af tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand eller sprit.

### Enkel fejlfinding

#### Kontroller at:

- nødstopet ikke er trykket ind, se ②
- batteriet er opladet
- håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

### Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades fra [www.botved.dk](http://www.botved.dk).

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Forhandler i Danmark:

A/S A. P. Botved  
Tilf: 80373737  
Fax: 70203737  
info@botved.dk